


# TRANSPLANTATIONS-INSTRUMENT

Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Gebrauchsanweisung

lipografter®



- 1 Entfernen Sie alle Teile vom AT-Valve®. Drehen Sie die Verschlusskappe auf den verfügbaren Anschluss am AT-Valve® entsprechend der Abbildung.
- 2 **2a** » Spritze auf AT-Valve® aufschrauben.  
» Öffnen Sie den Luer-Lock-Anschluss.  
**2b** » Verbinden Sie die Kanüle mit der gegenüberliegenden Seite des AT-Valve®.
- 3 Schließen Sie den Schlauch des Auffangbeutels an den verbleibenden Anschluss an.
- 4 Öffnen Sie die Klemme am Beutel, damit das Fettgewebe abfließen kann.
- 5 Verwenden Sie eine kleinvolumige Spritze, um den Beutelinhalt durch die Injektionskanüle zu spritzen.

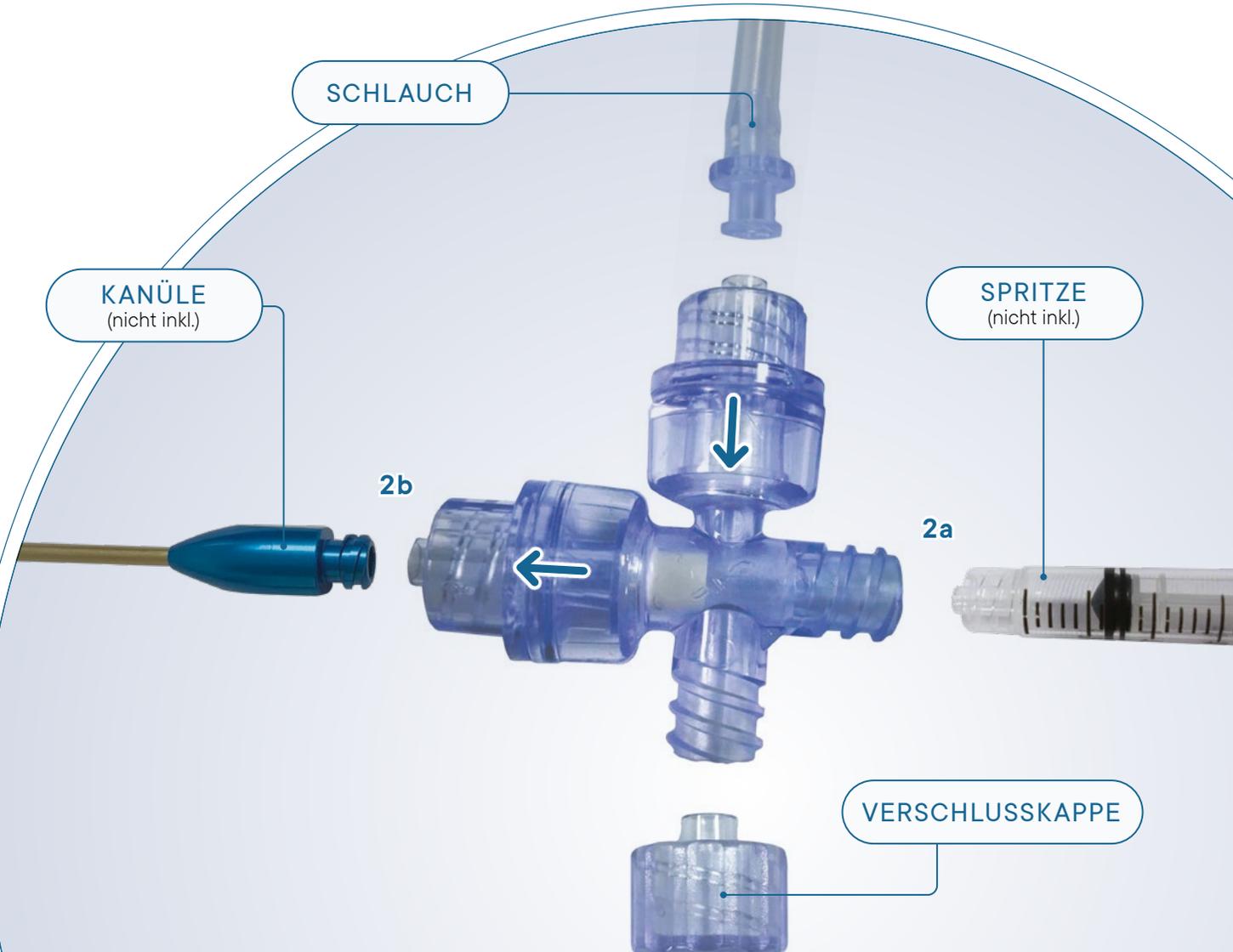

International Distributor  
**POLYTECH**

LipoGrafter®, KVAC®, und AT-Valve® sind eingetragene Marken von Lipocosm LLC.

\* VERBINDUNGSTEILE NICHT ZU FEST ANZIEHEN

## LIPOSUKTIONS-INSTRUMENT

Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Gebrauchsanweisung



### Inhalt der Verpackungseinheit (VE):

- » KVAC® LipoGrafter® System (Liposuktions-Instrument)
- » Atraumatisches Gewebeventil (AT-Valve® und Verschlusskappe)
- » LipoGrafter® Schlauch-Set und Beutel
  - › 4 Auffangbeutel (je 250 ml)
  - › Schläuche für die Verbindung der Teile

### Weitere benötigte Materialien (Nicht in VE enthalten):

- » Kanülenset (Kanülen mit kleinem Durchmesser und Mehrloch-Entnahmekanülen und Injektionskanülen mit Luer-Lock Anschlussstück)
- » Luer-Lock-Spritze
- » Scharfe Nadel (Großlochnadel empfohlen)

- 1 Stellen Sie sicher, dass die durchsichtige Verschlusskappe auf das AT-Valve® geschraubt ist.
- 2 Schließen Sie KVAC® an den offenen weiblichen Luer-Lock-Anschluss an.
- 3 Schließen Sie den Schlauch direkt an das AT-Valve® an.
- 4 Befestigen Sie den Auffangbeutel direkt am AT-Valve®.
- 5 Schließen Sie die Kanüle an das andere Ende des Schlauchs an.

✳ VERBINDUNGSTEILE NICHT ZU FEST ANZIEHEN

International Distributor  
**POLYTECH**

LipoGrafter®, KVAC®, und AT-Valve® sind eingetragene Marken von Lipocosm LLC.